




PM

YOUR
PROTECT
MASK

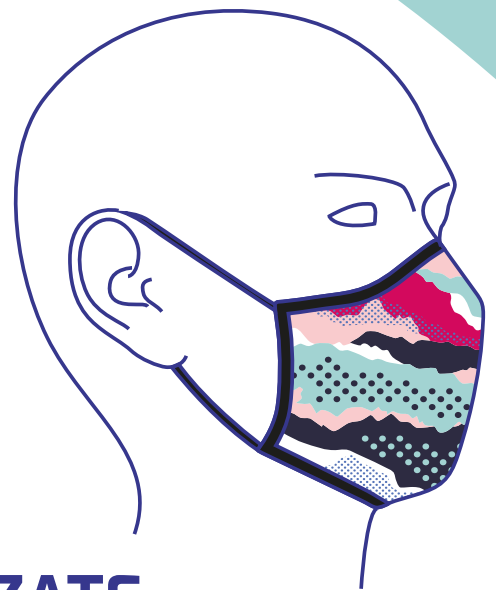


MASCHERINE PERSONALIZZATE con PRESTAZIONI EQUIVALENTI al TIPO FFP2 LAVABILI CON FILTRO SOSTITUIBILE

Mascherine filtranti per uso individuale prodotte in accordo
all' art. 16 comma 2 della Legge n. 27 del 24 aprile 2020

DATI TECNICI

Mascherina Protettiva Facciale

CARATTERISTICHE

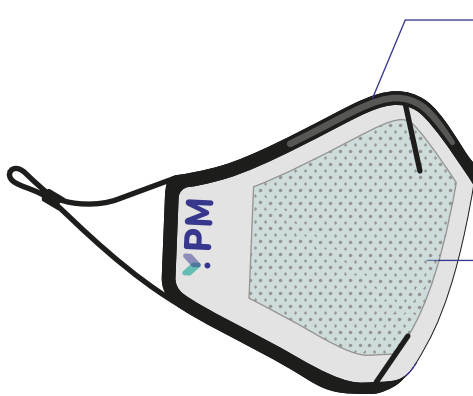

Parte strutturale



lavabile



tre strati di tessuto trattati

Filtro



sostituibile



triplo strato

Forma



Ergonomica, molto morbida a contatto con la pelle



Listello premi naso, per una miglior aderenza



Elastici regolabili confortevoli, per migliorare la vestibilità

TIPOLOGIE TESSUTO

	MATERIALE	PESO	TRATTAMENTO
ESTERNO e INTERNO	Poliestere (PES)	125 gr/m ²	IDROREPELENTE lavabile e riattivabile con stiratura
INTERNO	Poliestere (PES)	40 gr/m ²	ANTIBATTERICO lavabile

Tutti i tessuti rispettano le certificazioni **OEKO-TEX STANDARD 100**

TRATTAMENTI SUPERFICIALI DEI TESSUTI


	TRATTAMENTO
ESTERNO e INTERNO	Eco Barrier di HeiQ per garantire l'effetto anti-spray
INTERNO	Sanitized SILVER per sanificare il tessuto interno a contatto con il viso

MATERIALE FILTRO:

FF70/310 PBT PB SMS

MODALITÀ DI UTILIZZO

Come INDOSSARE la mascherina

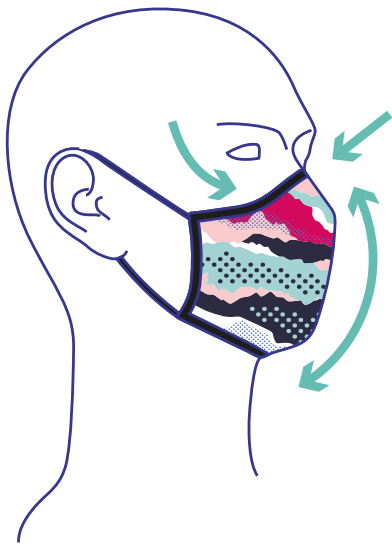

Indossare la mascherina avendo cura di **coprire bene naso e bocca** e non lasciare spazi sul contorno facciale.



È estremamente importante **non toccare la mascherina sul lato interno** (quello che andrà a contatto con il viso) **con mani non pulite** per non compromettere la sanificazione della stessa.

Raccomandazioni per RIGENERAZIONE

Estrarre il filtro usato e smaltirlo secondo le norme di smaltimento in uso.

Lavare la mascherina a **max 40°**.

Non occorre igienizzare, il tessuto è protetto da **Sanitized SILVER**.

Stirare obbligatoriamente dopo lavaggio a 110° max. per riattivare trattamento idrorepellente. Non è necessario attendere che sia asciugata la mascherina.

Consiglio: *stirare con interposizione di un panno per salvaguardare i colori della stampa.*

Inserire il nuovo filtro, avendo accortezza di operare con mani pulite e disinfettate e non appoggiandosi a superfici non igienizzate.




La mascherina è lavabile e riutilizzabile almeno 30 volte.



ATTENZIONE:
NON STIRARE la mascherina **CON il FILTRO INSERITO**. La mascherina ne verrebbe danneggiata e, probabilmente risulterebbe inservibile.


MODALITÀ DI UTILIZZO

Come RIMUOVERE un filtro usato

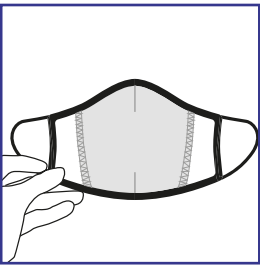

01

Dopo aver igienizzato le mani, posizionare la mascherina su un piano con l'interno rivolto verso l'alto.

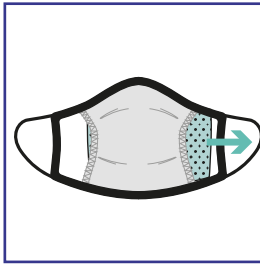

02

Per rimuovere il filtro usato è sufficiente estrarlo da uno dei due lati aperti della tasca interna. A questo punto la mascherina è pronta per essere lavata o per essere indossata nuovamente con un nuovo filtro.




ATTENZIONE:

si consiglia di rimuovere il FILTRO ogni 8 ore di uso o giornalmente.




La mascherina viene fornita corredata di un filtro. **Prima dell'utilizzo inserire il filtro come sotto indicato.**

Come INSERIRE un filtro nuovo

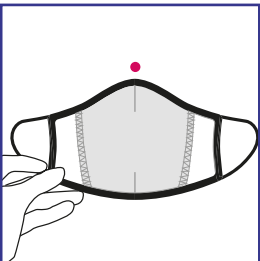


01

Dopo aver igienizzato le mani, posizionare la mascherina su un piano con l'interno rivolto verso l'alto. Il bordo nero più rigido ●, contenente il listello premi naso, deve rimanere sopra.

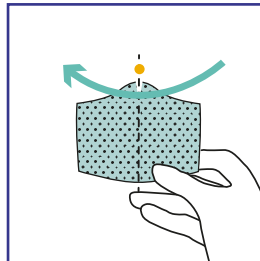


02

Prendere un filtro nuovo, mai utilizzato. Piegarlo a metà in modo simmetrico, mantenendo il taglio ● rivolto verso l'alto.

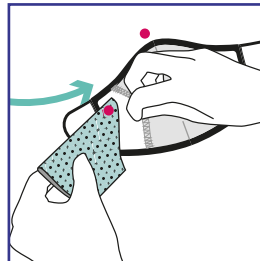


03

Inserire il filtro all'interno della tasca e aggiustarne la posizione con piccole rotazioni, in modo che i punti ● mostrati in figura coincidano.

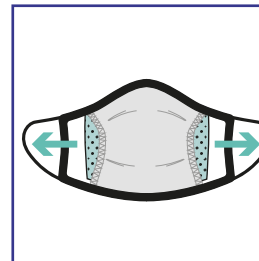

04


Aprire il filtro e tirare verso l'esterno i due lembi laterali.

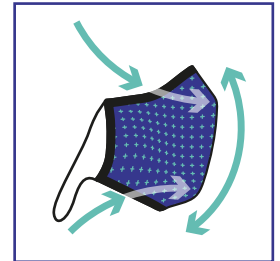

05

Far aderire il filtro alla mascherina esercitando una pressione dall'interno verso l'esterno. Quando la parte strutturale raggiunge la caratteristica forma semirigida, la mascherina è pronta per l'utilizzo.

RIFERIMENTI NORMATIVI / PRESTAZIONI

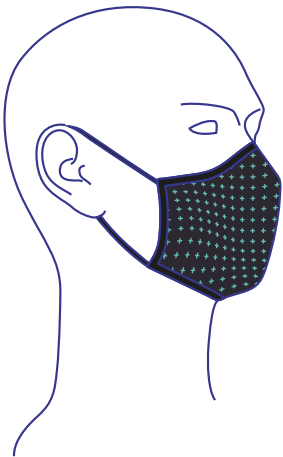

Mascherina prodotta con Poliestere trattato. Caratteristiche:

BFE (Capacità Filtrante) $\geq 98\%$ (Tipo **IR**)

Pressione Differenziale $< 60 \text{ Pa/cm}^2$

Bioburden (Pulizia Microbica) $\leq 30 \text{ ufc/g}$

Resistenza agli spruzzi $\leq 16.0 \text{ kPa}$

Prestazioni equivalenti

*Mascherina Tipo **IR***

ATTENZIONE: Indumento Mascherina

- ◆ **Non** è un **DPI**
- ◆ **Non** è un **DM**
- ◆ **Non** può essere utilizzato in **ambiente ospedaliero**

La mascherina è conforme alle normative
EN 14683 e ISO 10993.

CUSTOMIZATION

- ✓ **3 taglie disponibili** (uomo, donna, bambino)
- ✓ **infinite possibilità di personalizzazione**
(marchi e pattern aziendali, fantasie astratte, illustrazioni, tinte piene e sfumature.)



SMALL / *BAMBINO*



MEDIUM / *DONNA*



LARGE / *UOMO*

Realizza le tue mascherine.
Personalizza subito il tuo lotto.

Idea Ricamo S.r.l.
Strada del Francese 117/11
10156 Torino
tel. (+39) 011 4501490 - 011 4503059
P.IVA e CF 09241460014
www.idearicamo.it
info@idearicamo.it

